


PROCEDURA POBIERANIA KRWI PEŁNEJ NA BIBUŁĘ (KARTA WHATMAN LUB BIODISK)

1. NZOZ GENOMED przyjmuje krew pobraną na kartę Whatman lub na Biodisk. W obu przypadkach krew nasiąka na specjalna bibułę.

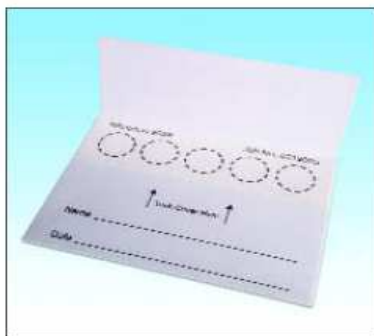

Karta Whatman



Biodisk

2. W zależności od rodzaju dostarczonej bibuły należy nakropić krew pacjenta pochodzącą z nakłucia palca pacjenta:
 - na 1 lub 3 krążki znajdujące się na karcie Whatman, lub
 - na środku bibuły Biodisku, tak aby powstała plama o średnicy około 1cm.**W obu przypadkach krew powinna przesiąknąć na drugą stronę karty!!!**
3. kartę Whatman lub Biodisk należy podpisać czytelnie, drukowanymi literami:
 - imieniem i nazwiskiem pacjenta
 - numerem PESEL, a w przypadku jego braku datą urodzenia.
4. kartę z plamami krwi należy wysuszyć w temperaturze pokojowej przez minimum 30 minut.
5. bibułę indywidualnego pacjenta należy zapakować do koperty lub torebki foliowej/aluminiowej.
6. nie wskazane jest pakowanie łączne kilku kart pochodzących od różnych pacjentów tak przygotowaną kartę wraz z wypełnionym skierowaniem na badanie molekularne oraz podpisanym formularzem "Deklaracja świadomej zgody na badanie molekularne" należy przesać na adres NZOZ GENOMED.